

전동식 의료용 세정기

Bi-JET PLUS



Bi-JET PLUS

전동식 의료용 세정기

Features

- Suction 및 Irrigation 라인에 2개의 클립이 포함되어 있어 압력과 유량 조절이 가능합니다.
- 배터리가 외부에 있어서 분사시 보다 안정적인 사용이 가능합니다.
- Short Tip(Knee용), Long Tip(Hip용)이 모두 포함되어 있어 다양한 수술에 사용이 가능합니다.
- 세정 유량은 느린 분사 속도에서는 $600 \pm 300 \text{ml/min}$ 이 가능하며, 빠른 분사 속도에서는 $900 \pm 400 \text{ml/min}$ 이 가능합니다.

사용 방법

가. 사용 전 준비사항

- ① 제품의 포장 파손여부와 유효기간을 확인하여 이상이 없는 제품만을 사용한다.
- ② 본 제품은 사용 환경(온도 $10 \sim 40^\circ$, 습도 $30 \sim 75\%$) 범위 내에서 사용한다.

나. 사용방법

- ① 포장을 뜯어서 제품을 꺼낸다.
- ② 핸드피스 끝 부분의 Locking ring을 눌러서 사용할 tip을 끼워 연결한다.
- ③ short tip은 넓은 상처부위 세정을 위하여 사용하고 long tip은 깊은 상처부위의 세정을 위해 사용한다.
- ④ 석션튜브(suction tube)를 개별흡인펌프(vacuum suction pump)와 연결한 후 압력이 0.06 MPa가 넘지 않도록 한다.
- ⑤ 세정액 공급튜브를 병원에 비치되어있는 생리식염수와 연결한다.
- ⑥ 스위치가 "O" 위치될 때 작동이 멈추며 스위치의 위쪽 부분에 표기되어있는 "I" 부분을 누르면 생리식염수 분사가 진행된다.
- ⑦ 수술 부위에 원하는 스피드로 생리식염수를 분사하여 세정한다. 세정하면서 세정액 공급튜브에 부착되어있는 클램프(flow control clamp)를 이용하여 생리식염수의 양을 조절할 수 있다.

주의 사항

가. 경고

- ① 모든 부품의 연결이 잘 이루어져 있는지 확인한다.
- ② 제품을 열리거나 과도한 열을 가하는 것은 피한다.

나. 일반적 주의사항

- ① 본제품은 일회용 멸균 의료기기로서, 재사용을 금한다.
- ② 동봉된 사용설명서를 읽고 사용법을 숙지 후 사용한다.
- ③ 직사광선이나 습기가 있는 장소를 피해 보관한다.
- ④ 생리식염수와의 연결부위, vacuum suction pump와의 연결 부위가 제대로 연결되어 있는지 확인한 후 사용한다.

의과용 의료용품

- 본 제품은 수술부위에 덮어 오염 등으로부터 보호하는 역할을 하는 기구로서 상처부위 또는 인체내부와 직접적인 접촉이 없는 비접촉 일회용 제품이다.

판매원 : (주)바이더스

경기도 성남시 판교로 470 우리빌딩 5층

Tel : 031-709-2282

Fax : 031-709-2289